



# JOINSTAR 3 IN 1 COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (25) COLLOIDAL GOLD

## GEBRAUCHSINFORMATION IN DE | EN

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARSCoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

### Technische Daten

JOINSTAR COVID-19-Ag Rapid Test (Colloidal Gold)

- Für anterior-nasale, nasopharyngeale und oropharyngeale Proben
- Sensitivität: 97,1% / Spezifität: 99,2%
- Haltbarkeit: 2 Jahre / Lagerung: Zwischen +2°C bis 30°C

### Inhalt und Lieferumfang


25 Tests pro Karton (= 1 VPE)

Alle Komponenten zur Testdurchführung enthalten:

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
  2. Extraktionspuffer
  3. Steriler Tupfer
  4. Gebrauchsanweisung
- Gebrauchsanweisung in DE und EN

## VIELSEITIG EINSETZBARER PROFI-TEST

- Erkennt Omikron-Variante und zeigt keine Kreuzreaktivität
- Auf drei unterschiedliche Arten einsetzbar (Nase tief, Nase kurz und Rachen)
- Versiegelte Pufferflüssigkeiten und Testkassetten garantieren lange Haltbarkeit
- BfArM-gelistet (AT236/20), CE-zertifiziert, PEI-evaluiert und auf EU-Liste
- Zugelassen für den professionellen Einsatz in (betrieblichen-) Teststraßen, Apotheken, Krankenhäusern und Arztpraxen
- Hohe Leistungsfähigkeit in aktueller Evaluierungsstudie von RKI und PEI (01/22) bestätigt.\*  
*\*Im direkten Vergleich zu anderen positiv evaluierten Schnelltests*
- Einfache Handhabung durch vorgefüllte Pufferflüssigkeit:

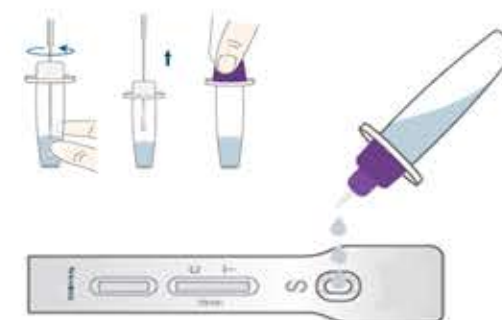

### Referenzen

- 2.500+ Apotheken (DE / AT)
- Kritische Infrastruktur / Internationale Flughäfen (DE)
- Etabliert im Langzeit-Einsatz in Universitätskliniken sowie einer Vielzahl weiterer medizinischen Einrichtungen und Laboren (DE / AT)
- Selbsttest-Variante gelistet in führender Drogeriemarktkette (DE / 2000+ Filialen)

### Unsere Garantie

1. Lückenlose Dokumentation mit LOT-Nummern bei allen Tests
2. Temperatur-kontrollierte Lagerung (Tests verlieren dauerhaft Ihre Funktion bei Exposition unter 2 Grad Celsius)
3. Strenge Qualitätsstandards bei Testauswahl / Originalware direkt vom Hersteller
4. 30 Jahre Diagnostik Know-How mit professionellen After-Sales-Service

## CHATEAU NATAL GmbH

Linke Wienzeile 118/19  
AT-1060 Wien

FN 54940 w  
UID: ATU38968104

+43 (0) 720 145 296 (AT)  
+49 (0) 305 201 4206 (DE)

info@chateau-natal.com  
www.chateau-natal.com