Healthcare for Professionals since 30 Years





GEBRAUCHSINFORMATION IN DE | EN | FR | ES | PT | IT

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SAR-SCoV-2-Antikörper in der Nachweiszone. Wenn die Probe SARSCoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden ha



Technische Daten

Bezeichnung:

Joinstar CE-Selbsttest 5er

- Sensitivität: 96,1% / Spezifität: 99,2%
- Haltbarkeit: 2 Jahre / Lagerung: Zwischen +2°C bis 30°C
- Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett

Inhalt und Logistik

Alle Komponenten zur Testdurchführung enthalten. Lieferumfang für einzelnes Test-Kit:

- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Proberohr mit Verschlussklappe und Extraktionspuffer
- Steriler Abstrichtupfer
- Einwegbeutel für die Entsorgung
- Gebrauchsanweisung in DE, EN, FR. ES, PT, IT

1 Karton = 100 Packungen (Stück) zu je 5 Test-Kits Maße Packung (Stück): B: 140 mm T: 40 mm H: 82 mm Maße Karton: L: 44cm B: 31cm H: 45 cm Bruttogewicht Stück: 86g / Karton: 9,45 KG Europalette: 6 Kartons/Lage; 4 Lagen hoch EAN: 9180001670165 / Zolltarifnummer: 38220000

NEUE SELBSTTEST -GENERATION

- Erkennt Omikron-Variante und zeigt keine Kreuzreaktivität (Vgl. mit PCR / Berlin 01-2022)
- Bekannt aus Listung bei mehreren, führenden Einzelhandelsketten in Deutschland
- Versiegelte Pufferflüssigkeit und Testkassette garantieren lange Haltbarkeit
- BfArM-gelistet und PEI-evaluiert (AT1276/21)
- Mit CE-Zertifizierung (CE 1011) Zugelassen zur Eigenanwendung in EU
 Erfüllt EN ISO 13485:2016
- Hohe Leistungsfähigkeit in aktueller Evaluierungsstudie von RKI und PEI (12/21) bestätigt.*

*Im direkten Vergleich zu anderen positiv evaluierten Schnelltests

Einfache Handhabung durch vorgefüllte Pufferflüssigkeit und Probenentahme mittels kurzem Nasnabstrich (ca. 1,5 cm):

ttels kurzem Nasnabstrich (ca. 1,5 cm

Referenzen

- 2.500+ Apotheken (DE und AT)
- Kritische Infrastruktur / Internationale Flughäfen (DE)
- Führende Drogermiemarktkette mit 2000+ Filialen (DE) und renommierter Einzelhandel
- Profi-Variante in Langzeit-Einsatz bei einer Vielzahl von medizinischen Einrichtungen, Laboren und Teststrassen

Unsere Garantie

- 1. Lückenlose Dokumentation mit LOT-Nummern bei allen Tests
- 2. Temperatur-kontrollierte Lagerung (Tests verlieren dauerhaft Ihre Funktion bei Exponierung unter 2 Grad Celsius)
- 3. Strenge Qualitätsstandards bei Testauswahl / Originalware direkt vom Hersteller
- 4. 30 Jahre Diagnostik Know-How mit professionellen After-Sales-Service

CHATEAU NATAL GmbH

Linke Wienzeile 118/19 AT-1060 Wien +43 (0) 720 145 296 (AT)

+49 (0) 305 201 4206 (DE)

FN 54940 w info@chateau-natal.com UID: ATU38968104 www.chateau-natal.com